



## **Инвалидное кресло-коляска**

**Мод. Н 035**

**с ручным приводом**

**Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации**



Кресло-коляска предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по любым покрытиям.

## 1. Основные технические характеристики

Длина в рабочем состоянии, мм	1020
Ширина в рабочем состоянии, мм	650
Ширина в сложенном состоянии, мм	280
Высота, мм	900
Высота сиденья, мм	500
Ширина сиденья, мм	460
Глубина сиденья, мм	430
Высота спинки, мм	400
Диаметр колес передние/задние, "	8/24
Масса, кг	20
Грузоподъемность, кг	110±1

## 2. Комплект поставки

1. Кресло-коляска \_\_\_\_\_ 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации \_\_\_\_\_ 1 шт.
3. Шестигранные гаечные ключи для регулировки длины подножек и подтягивания крепежных элементов сиденья \_\_\_\_\_ 2 шт.

## 3. Указание мер безопасности

При посадке больного в кресло-коляску и высадке из него колеса должны быть поставлены на тормоза. Не разрешается вставлять на подножки. Которые при посадке и высадке больного должны быть подняты в вертикальное положение.

Категорически запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами.

## 4. Подготовка кресла-коляски к эксплуатации

### а) Складывание и раскладывание:

Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента.

Для складывания кресла-коляски следует встать сбоку от кресла и, придерживая одной рукой за подлокотник с Вашей стороны, другой рукой потянуть на себя противоположную сторону рамы. Так же легко можно сложить кресло-коляску, просто потянув сиденье вверх.

Раскладывание производится в обратной последовательности. При этом нажимают на боковые элементы конструкции, в месте прикрепления сиденья к раме.

### б) Опоры для ног:

Кресло-коляска комплектуется съемными и поворотными опорами.

Для установки опор на кресло-коляску необходимо надеть опору на направляющие, находящиеся на раме и повернуть в сторону от колеса до срабатывания фиксатора.

Для снятия опор необходимо нажать рычажок фиксатора по направлению к центру, повернуть опору в сторону колеса и движением вверх снять ее с направляющих.

Регулировка длины подножек производится с применением гаечного ключа, который входит в комплект поставки.

### в) Тормоза:

Кресло-коляска снабжена слева и справа рычагами стояночного тормоза. Перемещением рычага, можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования.

### г) Колеса:

Кресло-коляска комплектуется колесами с шинами из вспененного полиуретана.

### д) Подлокотники:

Подлокотники ступенчатые, съемные. Перед снятием подлокотника отжать фиксирующую втулку, расположенную под местом переднего паза для вставки подлокотника.

### е) Рама:

Металлические части изготовлены из коррозионно-стойких материалов и имеют эмалевые лакокрасочные покрытия.

## 5. Обслуживание и уход при эксплуатации:

При эксплуатации кресло-коляска требует определенного технического ухода.

Обивку сиденья и спинки из ткани с водоотталкивающей пропиткой и подлокотники из искусственной кожи необходимо чистить теплой водой с применением мягких моющих средств. При необходимости дезинфекции допустимо протирание поверхностей 1 % раствором хлорамина.

Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом.

Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

### Сведения о сертификации

Сертификат соответствия № РОСС CN.АЯ46.В07906; срок действия с 02.08.2006г. по 21.06.2009 г.

Регистрационное удостоверение ФС № 2006/871 действительно с 9 июня 2006 года до 9 июня 2016 года.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.34.945.Д.002175.03.07 от 01.03.2007 г.

Изготовитель: «Jiangsu Yuyue Medical Equipment and Supply Co., Ltd», КНР

Импортер: ООО «Восточная Медицинская Компания»

### Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов. (ГОСТ Р 51081-97; ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

**Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!**

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Срок гарантии 12 месяцев

Дата продажи 22/09/2009 года

Сервисное обслуживание приборов производится в ООО «ВМК»

Контактный телефон: 812-347-5022

Адрес: \_\_\_\_\_

