

ПАСПОРТ

Костыли деревянные 01-КИ (подростковые)

Производитель: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Регулировка высоты от 116 см до 127 см

Допустимая нагрузка – до 100 кг

Количество в упаковке – 1 комплект (2 шт.)

Вес комплекта: 1,65 кг

Декларация о соответствии № РОСС RU.АГ99.Д16208

Срок действия с 15.08.2016г. по 14.08.2019г.

Регистрационное удостоверение № ФСР2010/08716

Срок действия с 19.12.2013г. срок действия не ограничен

ТУ 9396-001-18953835-2002

ПОСТАВЩИК: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Контактный телефон: (495) 968-82-83 (многоканальный)

143396, г. Москва, п. Первомайское, х. Ильичёвка, стр. 3.



Дата изготовления 25 ИЮЛ 2018



ПРОДАВЕЦ: _____

название организации, ИНН, адрес, телефон

Дата продажи _____ М. П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию.

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации костылей опорных

1. Костыли опорные предназначены для облегчения ходьбы лиц, имеющих повреждения и заболевания нижних конечностей, пользующихся протезами и ортезами, для лиц пожилого возраста с целью разгрузки суставов.
2. Опорная часть трости имеет снизу сменный наконечник из мягкой резины.
3. Костыли опорные для удобства пользования имеют регулировку по высоте как для боковых стоек (относительно ножки), так и высоты ручки.
4. Для того чтобы подобрать нужную высоту необходимо воспользоваться гаечным ключом.
5. Сначала рекомендуется выставить удобное положение ручки. Для этого в боковых стойках имеется набор отверстий для регулировки высоты ручки.
6. Затем рекомендуется выставить удобное по высоте положение подмышечника. Для этого необходимо открутить ключом крепежные гайки из ножки и подобрать удобное положение подмышечника.
7. После проведения вышеперечисленных операций требуется затянуть до упора все крепежные гайки и убедиться в их надежной фиксации.
8. Во время эксплуатации или после длительного хранения требуется проводить осмотр костылей опорных на наличие дефектов и надежного крепления всех элементов. При необходимости крепеж следует подтянуть до жесткой фиксации.
9. Эксплуатация костылей опорных с незатянутым крепежом или при обнаружении дефектов, влияющих на прочность конструкции - запрещена.
10. Хранение костылей опорных в домашних условиях должно производиться в сухом помещении вдали от отопительных приборов.
11. Хранение костылей опорных на складах и базах должно производиться в штабелях в сухом закрытом помещении на деревянных поддонах в улаковке предприятия-изготовителя при температуре не ниже 10 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 65%.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи.

Гарантия на наконечники не распространяется. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами.