



АРМЕД®
NON PROGREDI, EST REGREDI

Средство реабилитации
инвалидов: трость Armed
FS934

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | |
|---------------------------|------------|
| Габариты основания, мм | 170x220x70 |
| Высота трости, мм | 650-875 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Вес нетто, гр | 780 |

Средство реабилитации инвалидов: трость Armed FS934 предназначена для облегчения передвижения инвалидов и пациентов с малой и средней степенью нарушения координации движений.

Средство реабилитации инвалидов: трость Armed FS934 (далее по паспорту - трость) обеспечивает поддержку пациента во время ходьбы. Трости можно использовать при ходьбе на улице или в домашних условиях.

ОСОБЕННОСТИ

1. Трость телескопическая, изготовлена из алюминиевого металлического профиля, окрашена с применением порошкового напыления. Цвет - бронза, цвет основания - черный. Трость устойчива к коррозии.
2. Т-образная рукоятка выполнена из прочного не скользящего пластика. Рукоятка обеспечивает прочность ее захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате.
3. Опора квадратная с 4-мя упорами.
4. Упорные насадки резиновые, прочные, не скользящие, сменные.
5. Высота трости регулируется надежным кнопочным фиксатором, через 2,5 см. Трость имеет 10 уровней регулировки высоты.
6. Конструкция обеспечивает комфорт и устойчивость.

ПОДБОР РАЗМЕРА

Высота рукоятки под кисть должна быть такой, чтобы локтевой сустав находился в положении сгибания под углом 10-15 градусов.

Также важно правильно рассчитать размер ручки трости с учетом силы захвата ее рукой. Правильные размеры трости важны для обеспечения эффективного и безопасного передвижения.

При правильном использовании трости ее следует держать в руке, противоположно пораженной конечности: рука и нога передвигаются одновременно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Влажная обработка мыльными растворами без применения абразивных чистящих средств.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Средство реабилитации инвалидов: трость Armed FS934 - 1 шт.

Паспорт - 1 экз.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Средство реабилитации инвалидов: трость Armed FS934 соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2010/07911 действительно с 08.10.2010 г. Срок действия: не ограничен

Изготовитель: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, Ltd,

«Фошан Донгфанг Медикал Эквипмент Мануфактори», (Лтд), Китай, 5 Xingfu RD, Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, China

Дистрибьютор: ООО «ВостокМедимпорт»

199106, г. Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, д. 1, офис 5042

Тел. в г. Москве: (495) 989-12-88

Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02

Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Срок службы - не менее 2 лет.

Гарантийный срок на средство реабилитации инвалидов: трость Armed FS934 – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции. На быстроизнашивающиеся части гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «Представительство ЮЮ Медикал»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

Телефоны сервисных центров:

г. Москва: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61