



АРМЕД®
NON PROGREDI, EST REGREDI

Средство реабилитации
инвалидов: трость **Armed**
FS943L

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Высота трости в разложенном виде, мм	840
Максимальная нагрузка, кг	100
Вес нетто, гр	900

Средство реабилитации инвалидов: трость Armed FS943L предназначена для облегчения самостоятельного передвижения инвалидов, пожилых людей, больных в реабилитационный период после травм и операций.

Средство реабилитации инвалидов: трость Armed FS943L (далее по паспорту - трость) многофункциональная, обеспечивает поддержку пациента во время ходьбы. В разложенном виде трость превращается в стульчик, на котором пациент может отдохнуть во время прогулки.

ОСОБЕННОСТИ

1. Трость складная изготовлена из алюминиевых труб. Устойчива к коррозии.
2. Трость оснащена складным сиденьем и ручкой, которая выполняет также функцию рукоятки при использовании трости в сложенном состоянии. Рукоятка обеспечивает прочность ее захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате. Рукоятка и сиденье выполнены из высококачественного, гигиеничного пластика.
3. Сиденье фиксируется к основной трубе при помощи пластикового фиксатора на обратной стороне сиденья. Чтобы разложить трость необходимо потянуть сиденье за нижний край в горизонтальной плоскости. В разложенном виде сиденье опирается на три ножки.
4. Ножки стульчика снабжены резиновыми насадками против скольжения.
5. Опорная насадка резиновая, прочная, не скользящая, сменная.
6. Конструкция обеспечивает комфорт и устойчивость.

ПОДБОР РАЗМЕРА

Высота рукоятки под кисть должна быть такой, чтобы локтевой сустав находился в положении сгибания под углом 10-15 градусов.

Также важно правильно рассчитать размер ручки трости с учетом силы захвата ее рукой. Правильные размеры трости важны для обеспечения эффективного и безопасного передвижения.

При правильном использовании трости ее следует держать в руке, противоположно пораженной конечности: рука и нога передвигаются одновременно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Влажная обработка мыльными растворами без применения абразивных чистящих средств.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Средство реабилитации инвалидов: трость Armed FS943L - 1 шт.

Паспорт - 1 экз.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Средство реабилитации инвалидов: трость Armed FS943L соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2010/07911 действительно с 08.10.2010 г. Срок действия: не ограничен.

Изготовитель: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, Ltd,
«Фошан Донгфэнг Медикал Эквипмент Мануфактори», (Лтд), Китай, 5 Xingfu RD, Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, China

Дистрибьютор: ООО «ВостокМедимпорт»
199106, г. Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, д. 1, офис 5042

Тел. в г. Москве: (495) 989-12-88

Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02

Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Срок службы - не менее 2 лет.

Гарантийный срок на средство реабилитации инвалидов: трость Armed FS943L – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции. На быстроизнашивающиеся части гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «Представительство ЮЮ Медикал»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

Телефоны сервисных центров:

г. Москва: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61